

INSTRUCCIONES SOBRE EL USO DEL DISPOSITIVO EN UNA EMERGENCIA POR ASFIXIA

1 LLAMAR AL SERVICIO DE EMERGENCIA **061**

2



Retire el dispositivo del paquete.
Transmita a la víctima que la ayuda está en camino.

3



Acueste a la víctima, incline su cabeza hacia atrás y levante el metón para un acceso optimo a las vías respiratorias.

4



Inserte el tubo en la boca con la máscara respiratoria cubriendo la boca y la nariz.

5



Sostenga la máscara respiratoria entre el pulgar y los dedos y aplique presión firme para formar un sello entre la cara y la máscara.

6



Continúe aplicando presión firme sobre la máscara mientras tira con fuerza del mango.

7



Si la víctima continúa ahogándose, repita los pasos 4, 5 y 6. Se pueden realizar varios intentos para crear una succión adicional si es necesario.



Entre cada intento, retire la máscara 3 segundos

8



Una vez que se hayan desalojado los residuos, gire a la víctima sobre su costado para permitir que los residuos y/o líquidos adicionales salgan de la boca.